
## QaVR#med

# PRESERVATIVO PER VAGINA: UNA GUIDA IN SEI PASSAGGI PER DIVERTIRTI!

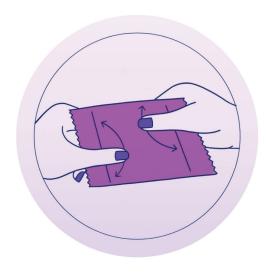

#### STEP 1


CONTROLLA LA SCADENZA E LUBRIFICA PER PRIMA COSA CONTROLLA CHE IL PRESERVATIVO NON SIA SCADUTO.

POI, CON MOVIMENTI DALL'ALTO VERSO IL BASSO, STROFINA CON LE DITA L'ESTERNO DELLA CONFEZIONE PER **SPARGERE IL LUBRIFICANTE ALL'INTERNO.** 

#### STEP 2

APRI LA CONFEZIONE SEGUENDO LA LINEA DI STRAPPO SULLA CONFEZIONE ED ESTRAI IL PRESERVATIVO.




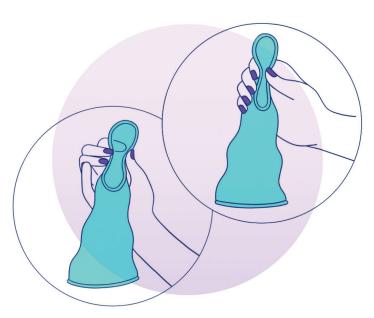

## STEP 3

POSIZIONA TIENI IN MANO IL
PRESERVATIVO PRENDENDOLO PER
L'ANELLO INTERNO SUPERIORE E
FACENDO PENDERE LA PARTE
APERTA DEL PRESERVATIVO IN BASSO.
UNA VOLTA CHE IL PRESERVATIVO
È COMPLETAMENTE ESTESO,
STRINGI (SENZA TORCERE) L'ANELLO
INTERNO IN MODO CHE DIVENTI
LUNGO E STRETTO.



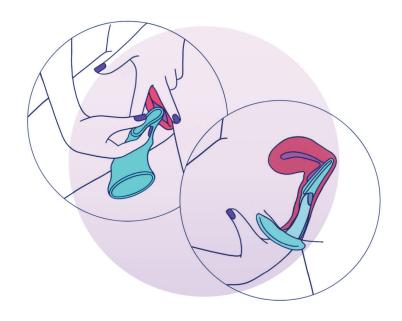



### STEP 4

INSERISCI. TROVA UNA POSIZIONE COMODA.
PUOI PROVARE A STARE IN PIEDI
APPOGGIANDO UN PIEDE SU UNA SEDIA,
SEDUT\* CON LE GAMBE DIVARICATE,
SDRAIAT\* O ACCOVACCIAT\*. CONTINUANDO
A STRINGERE L'ANELLO INTERNO,
ACCOMPAGNALO IN VAGINA. SPINGI
L'ANELLO INTERNO VERSO SU E INDIETRO,
VAI OLTRE L'OSSO PUBICO. ASSICURATI
CHE IL PRESERVATIVO NON SIA
ATTORCIGLIATO. L'ANELLO ESTERNO DEVE
RIMANERE FUORI, COPRENDO LE LABBRA.

## STEP 5

MOMENTO SEXY. FINCHÈ NON PRENDI
CONFIDENZA CON IL PRESERVATIVO PER VAGINA,
CON UNA MANO PUOI TENERE L'ANELLO ESTERNO
MENTRE CON L'ALTRA GUIDI IL PENE ALL'INTERNO
DELLA VAGINA. ASSICURATI CHE IL PENE SIA
ENTRATO CORRETTAMENTE ALL'INTERNO
DEL PRESERVATIVO. SE AVVERTI FASTIDIO,
FERMATI E SISTEMA L'ANELLO INTERNO CON
IL PRESERVATIVO INSERITO. NON È
NECESSARIO TENERE CON LA MANO L'ANELLO
ESTERNO DURANTE IL RAPPORTO SESSUALE.

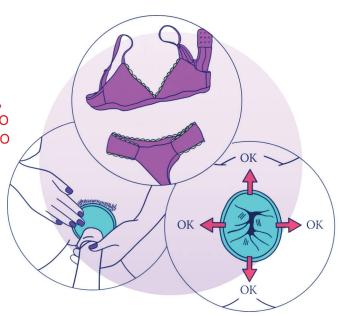

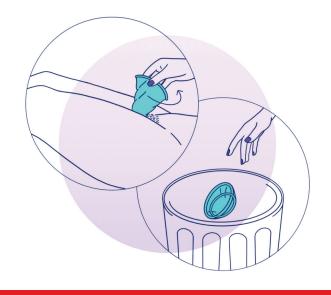

#### STEP 6

RIMUOVI. RUOTA L'ANELLO ESTERNO ED ESTRAI DELICATAMENTE IL PRESERVATIVO, GETTANDOLO NELLA SPAZZATURA. NON SCIACQUARE IL PRESERVATIVO! INOLTRE, NON RIUTILIZZARLO. CIASCUN PRESERVATIVO È SOLO PER USO SINGOLO.